



AquaMist™

Humidificateur nébuliseur



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Humidification

L'humidificateur nébuliseur AquaMist est conçu pour délivrer des concentrations précises en oxygène humidifié, à choisir selon les besoins cliniques.

Fonctionnement silencieux

L'AquaMist est conçu pour fonctionner en émettant un minimum de bruit, aidant à offrir un environnement clinique plus calme.

Haut débit d'humidité

Une concentration précise d'oxygène combinée à un haut débit d'humidité offre une solution idéale pour tous les besoins.

Options disponibles

L'AquaMist est disponible dans différentes configurations. Certaines d'entre elles sont fournies avec un flacon 500ml à remplir, quand d'autres peuvent être utilisées avec des flacons d'eau stérile adaptés.


Il peut être connecté de manière simple à des débitmètres 9/16 - 18UNF grâce à son raccord fileté universel. Les références 1500000 et 1502000 sont fournies avec un adaptateur 1506001 permettant la connexion sur un débitmètre BOC®. Un adaptateur M12, référence 1509001 est également disponible.

Molette sécurisée pour réglage de l'oxygène

La sélection de la concentration d'oxygène s'effectue en soulevant et en tournant la molette de l'humidificateur nébuliseur puis en alignant la concentration d'oxygène prescrite sur la flèche, comme indiqué sur l'image de gauche. Cette molette de sélection est pourvue d'un système aidant à réduire le risque de manipulation accidentelle pouvant modifier la concentration prescrite, offrant ainsi un dispositif sûr et fiable.

L'humidificateur nébuliseur fonctionne avec des débits de gaz moteurs de 5 à 11L/min, selon la concentration d'oxygène prescrite.

L'AquaMist doit être utilisé avec des débitmètres à oxygène conformes à la norme ISO 15002.

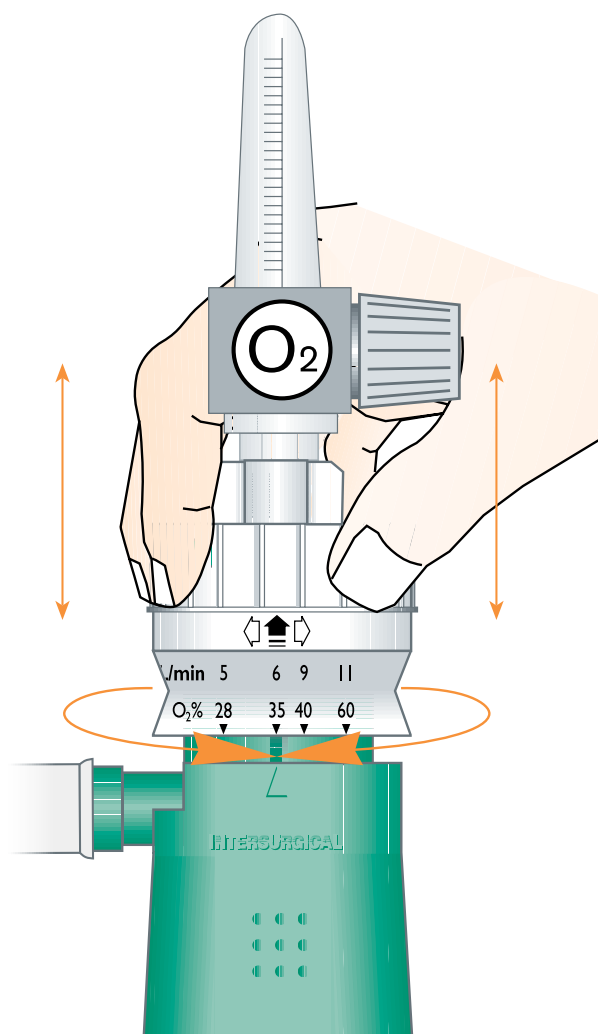



Faible bruit de fonctionnement

Pour offrir un environnement clinique plus calme

Molette de sélection de FiO₂ sécurisée

Réduction du risque de modification accidentelle de la concentration d'oxygène

Réglage aisé

Débit recommandé pour chaque concentration d'oxygène

Délivrance de concentrations précises en oxygène

Choix de réglages selon les besoins cliniques


Haut débit d'humidité

Niveaux optimum d'humidification





AquaMist™ humidificateur nébuliseur

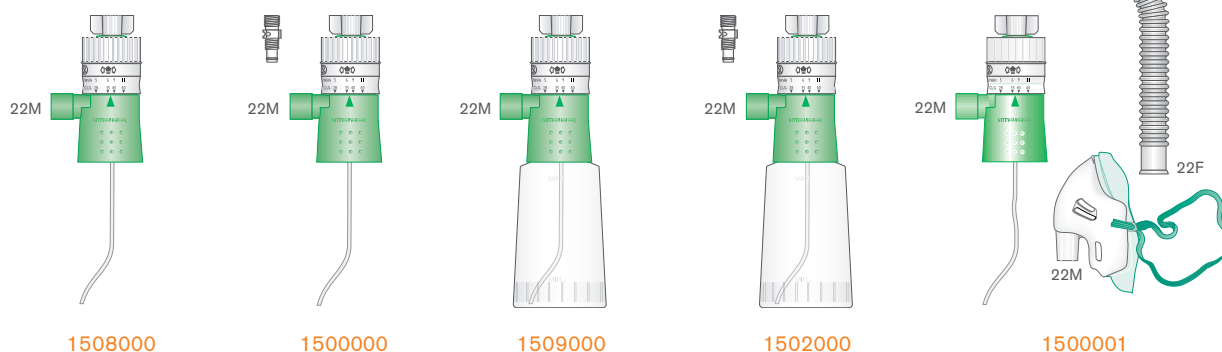

REF	Description	Qté/bte
1508000	AquaMist, humidificateur nébuliseur sans flacon	24
1500000	AquaMist, humidificateur nébuliseur sans flacon, avec adaptateur BOC®	24
1509000	AquaMist, humidificateur nébuliseur avec flacon, 500ml	25
1502000	AquaMist, humidificateur nébuliseur avec flacon et adaptateur BOC®, 500ml	25
1500001	Kit avec humidificateur nébuliseur sans flacon AquaMist, adaptateur BOC®, masque aérosol adulte Intersurgical EcoLite™, et Flextube™ 2.0m	15

Adaptateurs pour débitmètre

Les débitmètres à oxygène peuvent proposer différents types de connexion. La gamme d'adaptateurs Intersurgical a été conçue pour permettre la connexion de dispositifs d'humidification équipés de raccords filetés 9/16 UNF Diameter Index Safety System (D.I.S.S) sur des débitmètres BOC ou M12.

Pour choisir l'adaptateur convenant à votre utilisation, téléchargez l'affiche explicative intitulée 'Adaptateurs pour débitmètres à oxygène' :



www.intersurgical.fr/produits/oxygene-aerosoltherapie/adaptateurs-debitmetres

REF	Description	Qté/bte
1506001	Adaptateur débitmètre BOC®	50
1509001	Adaptateur débitmètre M12 (pas-de-vis français)	50

BOC est une marque commerciale de The BOC Group Ltd.

IS10.6 FR • Issue 13 09.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP