




Humidificateur Chauffant Série 7000

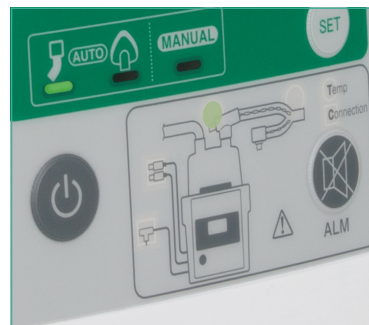

Soins Intensifs ▪ Humidificateur Chauffant

Humidificateur Chauffant Série 7000

L'humidificateur chauffant 7000 offre à l'utilisateur une option supplémentaire pour la ventilation avec humidification active et un complément idéal à notre large gamme de dispositifs à fil chauffant et d'accessoires.

L'humidificateur chauffant Série 7000 offre de nombreux avantages:

- Dispositif au fonctionnement intuitif et aux performances avancées
- L'utilisateur choisit quelle température est affichée par défaut
- Inclusion d'un mode manuel, permettant à l'utilisateur de pré-régler la température côté voies aériennes et côté chambre d'humidification,
- Mode défaut - pour revenir aux derniers réglages utilisés
- Panneau d'affichage des alarmes avec symboles indiquant la localisation et le degré de priorité
- Double sonde de température fournie

▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Bouton de verrouillage

une simple pression permet de mettre en place ou de retirer la chambre d'humidification

Sélection du mode

modes VPPI, VNI ou manuel permettant à l'utilisateur de régler les températures désirées

Plateau sécurisant


prévention de la mise en température du plateau en cas d'absence de chambre

Affichage configurable

selon le choix, indique la température au niveau de la chambre ou bien à la connexion Patient

Panneau d'affichage des alarmes

localise les alarmes et indique le degré de priorité

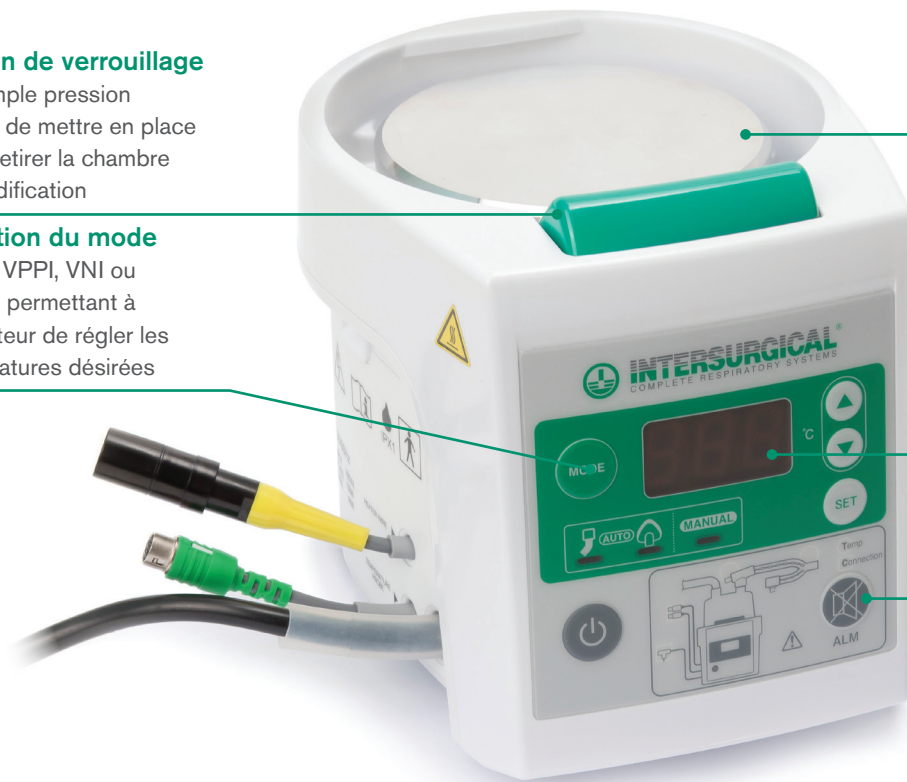

Référence	Description	Qté/bte
7000000	Humidificateur chauffant avec double sonde de température (Royaume-Uni)	1
7000001	Humidificateur chauffant avec double sonde de température (Japon)	1
7000002	Humidificateur chauffant avec double sonde de température (EU1) Europe de l'Ouest	1
7000003	Humidificateur chauffant avec double sonde de température (EU2) Europe de l'Est, Turquie et Portugal	1
7700000	Double sonde de température pour Humidificateur Chauffant Série 7000	1

Faire une demande



Chambres pour humidification chauffée

Nous offrons une gamme complète de chambres pour humidification active à utiliser avec les humidificateurs chauffants les plus communément rencontrés dans les services de soins intensifs, dont l'Humidificateur Chauffant Série 7000 d'Intersurgical.

Compatibles avec tous nos dispositifs à fil chauffant, tous nos modèles de chambre sont pourvus de raccords 22mm mâles et d'un corps transparent en polycarbonate pour une évaluation visuelle précise et instantanée du niveau de liquide.

- La chambre d'humidification **double flotteur auto-remplissage** peut être utilisée dans différentes thérapies respiratoires, de la CPAP à la ventilation mécanique assistée totale, dont l'Oscillation Haute Fréquence (HFO) quel que soit le patient. Cette chambre offre au clinicien un niveau d'eau constant, car la poche réservoir remplace automatiquement le liquide utilisé. Ainsi, le volume compressible du circuit ne fluctue pas. La chambre auto-remplissage représente le choix de référence dans tous les secteurs des soins intensifs, de la néonatalogie aux soins pour adultes.
- La chambre **à remplissage manuel** contient un clamp le long du tuyau de remplissage isolant la chambre de la poche réservoir de liquide. Ce dispositif nécessite que le clinicien surveille le niveau et ouvre le clamp quand du liquide est requis. Une alternative économique pouvant parfois être utilisée pour des applications en ventilation haute pression (par ex. nFlow™).
- La chambre **petit volume** à remplissage manuel est également pourvue d'un tuyau de remplissage avec clamp. Son très faible volume compressible est idéalement adapté pour des applications avancées telles que la ventilation haute fréquence quel que soit le patient.



2310000

2320000


2330000

Référence	Description	Qté/bte
2310000 (S*)	Chambre d'humidification auto-remplissage double flotteur avec tuyau de remplissage	30 (30*)
2320000	Chambre d'humidification remplissage manuel avec tuyau de remplissage et clamp	30
2330000	Chambre d'humidification remplissage manuel petit volume avec tuyau de remplissage et clamp	30

Faire une demande

Adaptateurs électriques

Une gamme d'adaptateurs électriques pour connecter les circuits avec fils chauffants à l'humidificateur.

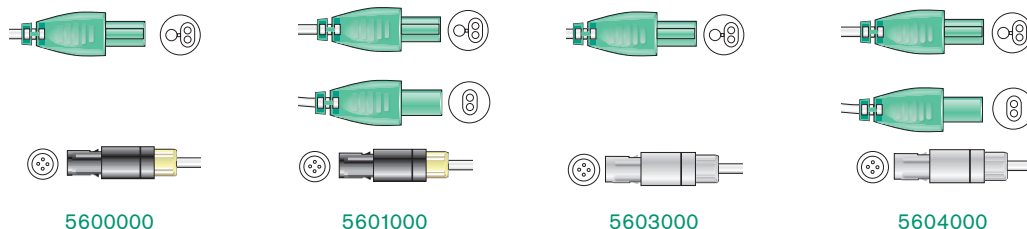

5600000

5601000

5603000

5604000

Référence	Description	Humidificateur	Qté/bte
5600000	Adaptateur électrique pour circuit à 1 fil chauffant avec connecteur noir	MR850™, Série 7000	1
5601000	Adaptateur électrique pour circuit à 2 fils chauffants avec connecteur noir	MR850™, Série 7000	1
5603000	Adaptateur électrique pour circuit à 1 fil chauffant avec connecteur gris	MR730™	1
5604000	Adaptateur électrique pour circuit à 2 fils chauffants avec connecteur gris	MR730™	1

Faire une demande


Disponible en version stérile

(S*) Ajoutez un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile du produit (la quantité par boîte des produits stériles est entre parenthèses).

MR850, MR730, MR850, MR500 et MR600 sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare.

Circuits respiratoires Flextube™ à fil chauffant pour humidification active


Circuits respiratoires disponibles avec un ou deux fil chauffants, pouvant être fournis complets avec ou sans chambre d'humidification. Tous les circuits respiratoires pour humidification active d'Intersurgical conviennent pour une utilisation avec la majorité des humidificateurs chauffants rencontrés dans les unités de soins intensifs.

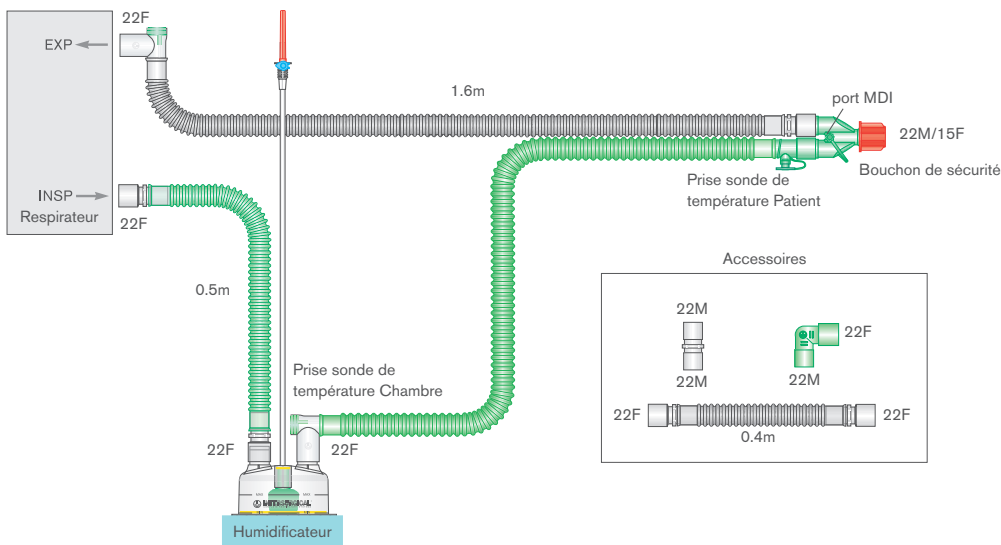

Circuit bichauffé

illustration

Référence	Description	Qté/bte
2026000 (S*)	Circuit respiratoire 22mm Flextube bichauffé avec branches 0.4m et 0.5m. $\geq 1.6m$	10 (12*)
2026310 (S*)	Circuit respiratoire 22mm Flextube bichauffé avec chambre auto-remplissage et branches 0.4m et 0.5m. $\geq 1.6m$	7 (6*)

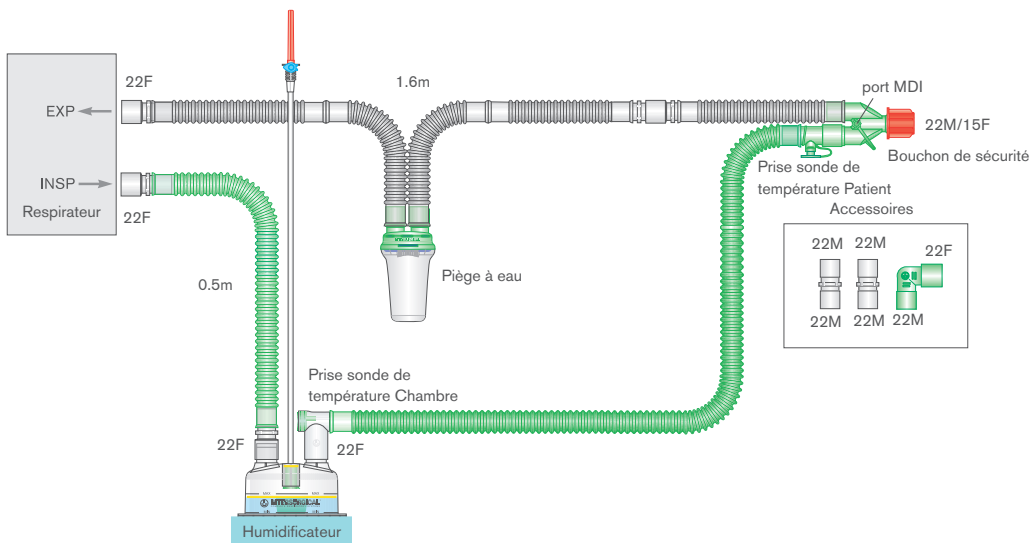

Faire une demande

Circuit monochauffé

illustration

Référence	Description	Qté/bte
2025000	Circuit respiratoire 22mm Flextube monochauffé avec piège à eau et branche 0.5m. $\geq 1.6m$	10
2025310 (S*)	Circuit respiratoire 22mm Flextube monochauffé avec piège à eau, chambre auto-remplissage et branche 0.5m. $\geq 1.6m$	7 (5*)

Nous proposons un large choix de circuits respiratoires pour humidification active, pour adulte, enfant et nouveau-né. Pour connaître la gamme, contactez notre équipe de vente ou visitez notre site web www.intersurgical.com



33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Le Pérépole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.